

Eagle
Support

SOPORTE EN NEOPRENO PARA EL PULGAR

Registro Sanitario INVIMA2016DM-0015286

Ref: FG-016

Composición: El neopreno de celdas cerradas proporciona calor y compresión curativos.

Ideal para: Tenosinovitis de quervain, proporcionar soporte en el pulgar sin restringir el uso total de la mano. La cómoda lengüeta con velcro se fija firmemente en su lugar.

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:

limpiar a mano
con jabón suaveEvite el uso de
blanqueador o cloro

No escurrir



No planchar

Secar al aire
a temperatura
ambienteNo lavar
en lavadora

No lavar en seco

Garantía:

El soporte para pulgar FTG-016 (Spika) tiene una garantía de 3 meses que cubre defectos de fabricación, tales como fallas en las costuras o material. La garantía no cubre daños por uso inapropiado o mal cuidado exposición a temperaturas extremas o uso inadecuado del soporte.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.