



Eagle Support

SOPORTE PARA CAMINAR

Registro Sanitario INVIMA2016DM-0015286

Ref: FT-010

Composición: La suela de perfil bajo con parte inferior abatible promueve el movimiento natural al caminar.

- Los puntales ranurados de poliuretano duradero permiten una sujeción más segura.
- Acolchado transpirable con forro suave para un uso cómodo.

Características: Dos montantes laterales fijos cortos de aleación de aluminio que estabilizan el tobillo y el pie.

- Forro acolchado de espuma para un tacto suave y cómodo en la piel.
- El diseño de la parte inferior con balancín promueve una marcha natural y reduce la presión plantar.
- Fácil de colocar y ajustar mediante correas circunferenciales.

Ideal para: Personas con afecciones o lesiones ortopédicas y traumatismos en el pie y tobillo, tales como problemas en el tendón de Aquiles, fracturas de tobillo y pie, condiciones pre y postoperatorias, y inestabilidad en la articulación del tobillo.

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:



limpiar a mano
con jabón suave



Evite el uso de
blanqueador o cloro



No escurrir



No planchar



Secar al aire
a temperatura
ambiente



No lavar
en lavadora



No lavar en seco

Garantía:

El soporte para caminar FT-010 tiene una garantía de 6 meses que cubre exclusivamente defectos de costura. La garantía no cubre desgastes naturales por el uso, tales como el desgaste en el material al apoyar frecuentemente el pie.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.