

Eagle
Support

SOPORTE PARA CAMINAR A RODILLA

Registro Sanitario INVIMA2016DM-0015286

Ref: KN-052

Composición: El soporte más corto proporciona una estabilidad cómoda.

- Bisagras con bloqueo de dial con limitación de rango de movimiento ajustable.
- Ajuste del rango de movimiento entre 0-90 de flexión de rodilla y 90-0 flexión.
- Forro acolchado de espuma para un tacto suave y cómodo sobre la piel.
- Refuerzo paletar.

Ideal para: lesiones de ligamentos o cirugía de lo mismo, también ideal en atrofas graves de cuádriceps y en actividades deportivas.

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:



limpiar a mano
con jabón suave



Evite el uso de
blanqueador o cloro



No escurrir



No planchar



Secar al aire
a temperatura
ambiente



No lavar
en lavadora



No lavar en seco

Garantía:

El soporte para caminar en neopreno KN-052 cuenta con una garantía de 6 meses que cubre defectos de fabricación en sus componentes, incluyendo las bisagras con bloqueo de dial, el mecanismo de limitación ajustable del rango de movimiento en flexión plantar y dorsal, y el refuerzo plantar.

No se ofrece cobertura por daños derivados de uso indebido, desgaste por uso normal, ajustes incorrectos en los rangos de movimiento o alteraciones del dispositivo que afecten su funcionalidad, así como fallos causados por mal manejo o modificaciones no autorizadas.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.