

Eagle
Support

SOPORTE DE MUÑECA EN NEOPRENO

Ref: WT-023

Composición: Neopreno con varilla en aluminio palmar, para mantener la posición neutra de la muñeca.

Ideal para: síndrome del túnel carpiano.

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:



limpiar a mano
con jabón suave



Evite el uso de
blanqueador o cloro



No escurrir



No planchar



Secar al aire
a temperatura
ambiente



No lavar
en lavadora



No lavar en seco

Garantía:

El soporte ortopédico para túnel carpiano WT-023 cuenta con 3 meses de garantía, que cubre exclusivamente defectos de costura. La garantía no cubre daños por uso inadecuado o mal cuidado, tales como:

Mal cuidado o mala limpieza, como la exposición del dispositivo a productos químicos agresivos o lavado inapropiado.

Uso prolongado o inapropiado, como el uso del soporte ortopédico durante actividades para las que no está diseñado o fuera de las indicaciones médicas.

Este soporte es de uso personal y no se aceptan devoluciones una vez abierto o utilizado, salvo que se presenten defectos de fabricación cubiertos por la garantía.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.