



SILICONA PODOLÓGICA MUY BLANDA									
PRODUCTO	BLANDA-BLANDA								
REFERENCIAS	- Ref. 10.025.1: Silicona Blanda-Blanda. Bote 500 g. - Ref. 10.025.3: Silicona Blanda-Blanda. Bote 200 g - Ref. 10.025.4: Silicona Blanda-Blanda. Bote 50 g								
DESCRIPCIÓN	Elastómero de silicona en forma de pasta de dureza blanda (shore A 2-4), vulcanizable a temperatura ambiente a través de una reacción de policondensación. La adición de catalizador (Reaktol o Master-Cat) hace que la silicona se endurezca y sea un material elástico y resistente. Su formulación destaca por contener aceite de grado medicinal, agente antimicrobiano e hidroxiprolisilano (regenerador celular).								
COMPOSICIÓN	Polímero de silicona, aceite de grado medicinal, polidimetilsiloxano, colorante, esencia de fresa, antioxidante, hidroxiprolisilano, antibacteriano.								
PRESENTACIÓN	Envase formato tarro con un contenido en silicona según referencia: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th><th>Contenido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.025.1</td><td>500 g</td></tr> <tr> <td>10.025.3</td><td>200 g</td></tr> <tr> <td>10.025.4</td><td>50 g</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Contenido	10.025.1	500 g	10.025.3	200 g	10.025.4	50 g
Referencia	Contenido								
10.025.1	500 g								
10.025.3	200 g								
10.025.4	50 g								
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	- Dureza muy blanda (Shore A): 2-4 - Incluye aceites medicinales. - Con agente bacteriano y regenerador celular. - Ideal para obtener paliativas. - La elasticidad de la órtesis aumenta al cabo de unos días. - Fácil de trabajar: No se rompe ni se adhiere en la mano. - Muy buen aspecto y color rosa. - Admite mezclas.								

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	▪ Aspecto: Pasta de silicona viscosa. ▪ Color: Rosa ▪ Olor: Fresas. ▪ Punto de inflamabilidad: 184 °C ▪ Punto de ebullición: 845 °C ▪ Densidad (20°C): 1,2 g/cm³ ▪ Solubilidad en agua: Insoluble.	
INDICACIONES	En podología y ortopedia para todo tipo de órtesis y ortoplasias. Está especialmente diseñada para la confección de órtesis muy blandas y elásticas, paliativas, reductoras del dolor. Ideal para reducir zonas de presión y roces, así como confección de elementos separadores interdigitales y de almohadillado. Gran esponjosidad y elasticidad. No se rompe.	
MODO DE EMPLEO	Al llevar aceites minerales tarda más en catalizar. Amasarla bien, con unas gotas de catalizador, se forma una bola y en el momento en que veamos que ya empieza a ponerse un poco dura, aplicarla inmediatamente a la zona y modelar la órtesis: 1) Tomar la cantidad de silicona necesaria y añadir catalizador. La relación silicona/catalizador es de 100 partes de silicona por 5 partes de catalizador. 2) Amasar energéticamente la pasta de silicona con el catalizador. 3) Una vez amasada, aplicar de manera inmediata al punto de aplicación y mantener fija hasta pasados unos minutos. 4) El vulcanizado completo se alcanza a las 24 horas, aunque a los pocos minutos ya se puede retirar la órtesis, retocarla y entregarla al paciente. El tiempo de manipulación hasta endurecimiento total es de 5 min.	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario: Clase I.	
PRECAUCIONES	Controlar la cantidad de catalizador y tiempo de amasado. Es importante no añadir más catalizador del necesario y amasar bien y con rapidez, ya que, si no, la órtesis empieza a vulcanizar y si a partir de este momento seguimos mezclando, se formará una órtesis con grumos, mal acabada que se rasgará con facilidad.	
ADVERTENCIAS	▪ Mantener fuera del alcance de los niños. ▪ Si se produce algún tipo de rechazo o irritación suspender el uso y consultar con su especialista.	
ALMACENAMIENTO	▪ Conviene mantenerlo en el embalaje original a menos de 30°C ▪ Conservar en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada.	
SÍMBOLOS		Fabricante.
		Producto sanitario.
		Marcado CE.
CERTIFICADOS ISO	Sistema de gestión de calidad y medio ambiente implantado y certificado acorde a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.	

Mayo 2025