



METATARSALGIA + DEFORMIDAD DIGITAL	
PRODUCTO	FIXTOE PRO
REFERENCIAS	- FIXTOE PRO BEIGE. Talla: Única. - FIXTOE PRO NEGRO. Talla: Única.
DESCRIPCIÓN	Fixtoe pro es una banda elástica bilateral que se adapta en función del ancho del pie ya que está fabricada con tejido elástico. Compuesto por tres piezas: 1) La banda elástica con auto cierre que permite adaptarse a la morfología del pie gracias a su material elástico. 2) La bóveda o almohadilla metatarsal de 4 mm, que se ajusta a la banda elástica, mediante velcro, por la parte interna de esta. La almohadilla metatarsal permite crear una descarga en herradura. 3) Una pieza en forma de T con cierres termo sellados con velcro para adherirlo a la banda elástica y también contiene silicona para evitar que esta pieza se deslice por el dedo. Es un vendaje que permite corregir el dedo con la deformidad.
COMPOSICIÓN	▪ Banda elástica: Elástico (transpirable y antibacteriano): - Poliamida 50 % - Olefinas 30 % - Elast 20 % de cierres auto agarrantes ▪ Bóveda: P.U. 4 mm: 100% poliéster. - Velcro macho: Extrusionado, poliamida 12. - Hilo poliéster. ▪ Composición lengüeta: Tejido punto poliéster. - Silicona (polímeros de siliconada curado por adición, pastas transparentes, de alta viscosidad). - Polipiel: 90 % MICROFIBER+10 % PU - Velcro termosellado: 90 % Nylon+ 10% Tpu
PRESENTACIÓN	Una cajita de cartón con 1 FIXTOE PRO y folleto.
INDICACIONES	Está indicado para deformidades digitales y patologías del antepié como tratamiento de: - Predislocación metatarsofalángica (dedo flotante). - El dolor metatarsal. - Callosidad plantar, protección callosidad de los dedos, dedos en garra, dedo martillo y protección de juanete. - Capsulitis metatarsofalángica. También está indicado como estabilizador digital postquirúrgico en osteotomías de Weil.

MODO DE EMPLEO	Lea atentamente las instrucciones de uso: 1) Extraer la banda elástica del dispositivo 2) Posicionar la zona del antepié (zona situada debajo de los dedos) en la almohadilla metatarsal, sin llegar a tocar los dedos. Colocar la almohadilla siempre en el extremo alejado del velcro. Dar la vuelta al elástico si es necesario y colocar la almohadilla siempre en la parte contraria del velcro. 3) Cerrar la banda elástica siempre en la zona extrema, dedo pequeño del pie. Nunca cerrarla en la zona media (Juanete). 4) Anclar la parte intermedia de las lengüetas en el empeine de la banda coincidiendo con el dedo afectado. 5) Abrazar con las lengüetas el dedo afectado o separado o conjuntamente. 6) Cruzar las lengüetas abrazando el dedo afectado dejando los extremos en la zona plantar. 7) El profesional sanitario tiene la opción de cortar la herradura con el tamaño deseado para adaptarlo y descargar la cabeza del metatarsiano afectado. Realizar la descarga dentro de los límites del cuadro marcado con el cortafuegos sin llegar a cortar el hilo limitante. 8) Colocar la parte recortada de la herradura. Anclar las lengüetas en la planta dejando libre la zona central en la que queda la herradura. Las lengüetas se pueden anclar tanto de forma paralela o como de forma cruzada.
BENEFICIOS	▪ Alivio inmediato de la metatarsalgia asociada a la deformidad digital. ▪ Frena la evolución de la deformidad digital. ▪ Logra estabilizar la articulación metatarsofalángica. ▪ Retrasa la aparición de callosidad metatarsal y del dorso de los dedos centrales. ▪ Se ajusta a la ergonomía de cualquier tipo de pie gracias a su talla universal. ▪ Transpirable y lavable gracias a su material poroso. ▪ Compatible con cualquier tipo de calzado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	▪ Disponible en dos colores según referencia: Beige o Negro. ▪ Banda elástica: - Transpirable y antibacteriana. - Longitud x Ancho: 27 cm x 6 cm ▪ Pieza en forma de T: Compuesta por polipiel. ▪ Bóveda metatarsal: 10,5 x 7 cm ▪ Talla: Única. ▪ Bilateral.
CARACTERÍSTICAS	▪ Vendaje antibacteriano y transpirable. ▪ Silicona antideslizante que permite la fijación de la lengüeta al dedo predislocado. ▪ Almohadilla con cortafuegos que permite la posibilidad de realizar la descarga en herradura. ▪ Vendaje ultrafino que permite una mayor comodidad al paciente al ponerlo con el calzado.

CLASIFICACIÓN	Registro Sanitario INVIMA 2024DM-0029561 Producto sanitario: Clase I.
CÓDIGO NACIONAL	Ref. 50.600.26 (beige) → C.N. 197221.7
DATOS LOGÍSTICOS	Número de Artículo Europeo (EAN): - Ref. 50.600.26 → EAN: 8437018201020 - Ref. 50.600.27 → EAN: 8437026510480
DISEÑO	
CONSERVACIÓN	- No precisa condiciones específicas de conservación. - Se recomienda lavar Fixtoe periódicamente a mano y con agua fría. - No planchas ni meter en secadora. - No utilizar lejía. - No lavar en seco. - Secar a temperatura ambiente sin exponer a ninguna fuente de calor directamente. - Cerrar los velcros antes de lavar el dispositivo.
CONTRAINDICACIONES	No debería usarse Fixtoe cuando: - Sea paciente diabético. - Haya hinchazón o edema en el pie. - Presencia de herida abierta o úlcera en el pie. - Tenga deformidad digital rígida. - Presente alteraciones en la piel.

PRECAUCIONES	▪ No utilizar si se ha tenido alguna reacción alérgica a alguno de los materiales que lo componen. ▪ No utilizar si no padece ninguna de las patologías para su indicación. ▪ No utilizar si padece algún tipo de ulceración en el pie. ▪ Ser utilizada por el mismo usuario. ▪ Si el uso es solo para protección de dedos en garra, no tensar las lengüetas. Solo tensarlas si el uso es para dedos flotantes o predislocación. ▪ El fabricante y distribuidor no se hacen responsables de cualquier alteración o modificación del dispositivo original, o mal uso del usuario.	
IMÁGENES	Color Beige: 50.600.26 Parte inferior:  Parte superior:  Color Negro: 50.600.27 Parte inferior:  Parte superior: 	
ALMACENAMIENTO	▪ Almacenar en un entorno limpio, fresco y seco. ▪ Proteger de la luz solar directa.	
SÍMBOLOS		Fabricante.
		Marcado CE.