



| <b>SILICONA PODOLÓGICA DE DUREZA MEDIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |       |          |       |          |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|------|
| <b>PRODUCTO</b>                            | <b>SILICONA PODIABLAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>REFERENCIAS</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ref. 10.022.1: SILICONA PODOLÓGICA MEDIUM. Bote 500 g.</li> <li>▪ Ref. 10.022.3: SILICONA PODOLÓGICA MEDIUM. Bote 200 g.</li> <li>▪ Ref. 10.022.4: SILICONA PODOLÓGICA MEDIUM. Bote 50 g.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                         | <p>Elastómero de silicona en forma de pasta de dureza media (shore A 12-15), vulcanizable a temperatura ambiente a través de una reacción de policondensación. La adición de catalizador (Reaktol o Master-Cat) hace que la silicona se endurezca y sea un material elástico y resistente.</p> <p>Su formulación destaca por contener aceite de grado medicinal, agente antimicrobiano e hidroxiprolisilano (regenerador celular).</p>                   |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                         | Polímero de silicona, aceite de grado medicinal, polidimetilsiloxano, colorante, esencia de fresa, antioxidante, hidroxiprolisilano, antibacteriano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                        | <p>Envase de plástico con un contenido en silicona según referencia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th><th>Contenido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.022.1</td><td>500 g</td></tr> <tr> <td>10.022.3</td><td>200 g</td></tr> <tr> <td>10.022.4</td><td>50 g</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                      | Referencia | Contenido | 10.022.1 | 500 g | 10.022.3 | 200 g | 10.022.4 | 50 g |
| Referencia                                 | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |          |       |          |       |          |      |
| 10.022.1                                   | 500 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |       |          |       |          |      |
| 10.022.3                                   | 200 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |          |       |          |       |          |      |
| 10.022.4                                   | 50 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dureza media (Shore A): 12-15.</li> <li>▪ Incluye aceites medicinales.</li> <li>▪ Con agente antibacteriano y regenerador celular.</li> <li>▪ Ideal para obtener órtesis correctoras.</li> <li>▪ La elasticidad de la órtesis aumenta al cabo de unos días.</li> <li>▪ Fácil de trabajar: No se rompe ni se adhiere en la mano.</li> <li>▪ Muy buen aspecto y color rosa.</li> <li>▪ Admite mezclas.</li> </ul> |            |           |          |       |          |       |          |      |
| <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspecto: Pasta de silicona viscosa.</li> <li>▪ Color: Rosa</li> <li>▪ Olor: Fresas.</li> <li>▪ Punto de inflamabilidad: &gt; 200 °C</li> <li>▪ Punto de ebullición: 919 °C</li> <li>▪ Densidad (20°C): 1,2 g/cm<sup>3</sup></li> <li>▪ Solubilidad en agua: Insoluble.</li> </ul>                                                                                                                               |            |           |          |       |          |       |          |      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INDICACIONES</b>     | En podología y ortopedia para todo tipo de ortesis y ortoplasias. Indicada para uso profesional. Ideal para ortesis correctoras. Ideal para reducir zonas de presión y roces, así como para la confección de elementos separadores interdigitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>MODO DE EMPLEO</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tomar la cantidad de silicona necesaria y añadir 3 o 4 gotas de catalizador. La relación silicona/catalizador es de 100 partes de silicona por 5 partes de catalizador.</li> <li>2) Amasar energéticamente la pasta de silicona con las 3 o 4 gotas de catalizador, dependiendo de la cantidad de pasta que cojamos.</li> <li>3) Una vez amasada, aplicar de manera inmediata al punto de aplicación y mantener fija hasta pasados unos minutos.</li> <li>4) El vulcanizado completo se alcanza a las 24 horas, aunque a los pocos minutos ya se puede retirar la ortesis, retocarla y entregarla al paciente. El tiempo de manipulación hasta endurecimiento total es de 5 min.</li> </ol> |                     |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>    | Producto sanitario: Clase I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>PRECAUCIONES</b>     | Controlar la cantidad de catalizador y tiempo de amasado. Es importante no añadir más catalizador del necesario y amasar bien y con rapidez, ya que, si no, la ortesis empieza a vulcanizar y si a partir de este momento seguimos mezclando, se formará una ortesis con grumos, mal acabada que se rasgará con facilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>ADVERTENCIAS</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantener fuera del alcance de los niños.</li> <li>▪ Si se produce algún tipo de rechazo o irritación suspender el uso y consultar con su especialista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conviene mantenerlo en el embalaje original.</li> <li>▪ Conservar en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada.</li> <li>▪ Conservar a una temperatura entre 5 y 30°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>SIMBOLOS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fabricante.         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Producto sanitario. |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marcado CE.         |
| <b>CERTIFICADOS ISO</b> | Sistema de gestión de calidad y medio ambiente implantado y certificado acorde a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |

Mayo 2025