



10.014

SILICONA PODOLÓGICA SEMIDURA									
PRODUCTO	SILICONA SERIE MÁSTER								
REFERENCIAS	- Ref. 10.014 Silicona serie máster. Bote 500 g. - Ref. 10.014.2 Silicona serie máster. Bote 50 g. - Ref. 10.014.3 Silicona serie máster. Bote 200 g.								
DESCRIPCIÓN	Elastómero de silicona en forma de pasta de dureza alta (shore A 25-26), vulcanizable a temperatura ambiente a través de una reacción de policondensación. La adición de catalizador (Reaktol o Master-Cat) hace que la silicona se endurezca y sea un material elástico y resistente. Su formulación destaca por contener aceite de grado medicinal, agente antimicrobiano e hidroxiprolisilano (regenerador celular).								
COMPOSICIÓN	Polímero de silicona, aceite de grado medicinal, polidimetilsiloxano, colorante, esencia de fresa, antioxidante, hidroxiprolisilano e iones de plata antimicrobianos.								
PRESENTACIÓN	Envase formato tarro con un contenido en silicona según referencia: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th><th>Contenido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.014</td><td>500 g</td></tr> <tr> <td>10.014.2</td><td>50 g</td></tr> <tr> <td>10.014.3</td><td>200 g</td></tr> </tbody> </table>	Referencia	Contenido	10.014	500 g	10.014.2	50 g	10.014.3	200 g
Referencia	Contenido								
10.014	500 g								
10.014.2	50 g								
10.014.3	200 g								
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	- Dureza alta (Shore A): 25-26 - Incluye aceites medicinales. - Con agente bacteriano y regenerador celular. - Ideal para obtener paliativas. - La elasticidad de la órtesis aumenta al cabo de unos días. - Fácil de trabajar: No se rompe ni se adhiere en la mano. - Muy buen aspecto y color rosa. - Admite mezclas.								
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	- Aspecto: Pasta de silicona viscosa. - Color: Rosa - Olor: Fresas. - Punto de inflamabilidad: > 200 °C - Densidad (20°C): 1,2 kg/dm³ - Solubilidad en agua: Insoluble.								

INDICACIONES	En podología y ortopedia para todo tipo de ortesis y ortoplasias. Ideal para ortesis correctoras. Indicada para uso profesional.	
MODO DE EMPLEO	Al llevar aceites minerales tarda más en catalizar. Amasarla bien, con unas gotas de catalizador, se forma una bola y en el momento en que veamos que ya empieza a ponerse un poco dura, aplicarla inmediatamente a la zona y modelar la órtesis: 1) Tomar la cantidad de silicona necesaria y añadir catalizador. La relación silicona/catalizador es de 100 partes de silicona por 5 partes de catalizador. 2) Amasar energéticamente la pasta de silicona con el catalizador. 3) Una vez amasada, aplicar de manera inmediata al punto de aplicación y mantener fija hasta pasados unos minutos. 4) El vulcanizado completo se alcanza a las 24 horas, aunque a los pocos minutos ya se puede retirar la órtesis, retocarla y entregarla al paciente. El tiempo de manipulación hasta endurecimiento total es de 5 min.	
PRECAUCIONES	Controlar la cantidad de catalizador y tiempo de amasado. Es importante no añadir más catalizador del necesario y amasar bien y con rapidez, ya que, si no, la ortesis empieza a vulcanizar y si a partir de este momento seguimos mezclando, se formará una ortesis con grumos, mal acabada que se rasgará con facilidad.	
ADVERTENCIAS	▪ Mantener fuera del alcance de los niños. ▪ Si se produce algún tipo de rechazo o irritación suspender el uso y consultar con su especialista.	
ALMACENAMIENTO	▪ Conviene mantenerlo en el embalaje original. ▪ Conservar en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. ▪ Conservar a una temperatura entre 5 y 30°C	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario: Clase I.	
SÍMBOLOS		Fabricante.
		Producto sanitario.
		Marcado CE.
CERTIFICADOS ISO	Sistema de gestión de calidad y medio ambiente implantado y certificado acorde a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.	

Mayo 2025