



SOPORTE ORTOPÉDICO

ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR

Inmovilizador de hombro

Reg. Sanitario INVIMA 2025DM-0030638

Ref: AS-004

Talla : UNIVERSAL

Composición: Neopreno, Nailon.

Ideal para: Se utiliza después de separaciones, dislocaciones, distensiones u otras lesiones. La correa de pecho de neopreno con cierres de gancho permite colocar la faja en la ubicación deseada. El arnés se puede utilizar solo cuando ya no se necesita la faja. Para determinar el tamaño, mida el contorno del pecho, incluido el brazo lesionado.

- * Asegura el brazo contra el cuerpo.
- * Puede usarse como cabestrillo para el brazo si no se desea envolverlo.
- * Se adapta tanto al brazo izquierdo como al derecho.

Contraindicaciones: si experimenta irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material, detenga su uso.

Instrucciones de lavado:



limpiar a mano
con jabón suave



Evite el uso de
blanqueador o cloro



No escurrir



No planchar



Secar al aire
a temperatura
ambiente



No lavar
en lavadora



No lavar en seco

Garantía:

Tiene una garantía de 3 meses que cubre defectos de fabricación, tales como fallas en las costuras o material. La garantía no cubre daños por uso inapropiado o mal cuidado exposición a temperaturas extremas o uso inadecuado del soporte.

Guía de Cuidados para Prolongar la Vida Útil de los Soportes Ortopédicos - Eagle Support

1. **Limpieza Regular:** Limpie el soporte ortopédico Eagle Support con un paño suave y húmedo después de cada uso. Evite sumergir el producto en agua o usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material y afectar su funcionamiento.
2. **Secado Adecuado:** Asegúrese de que el soporte esté completamente seco antes de guardarlo. Evite la exposición directa al sol o fuentes de calor intenso (como secadores de cabello o radiadores) que puedan deformar o dañar el material, como el neopreno o las bisagras.
3. **Ajuste Correcto:** Ajuste el soporte Eagle Support siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso adecuado. No lo ajuste de manera excesiva ni lo utilice fuera de los límites establecidos para evitar daños en las bisagras, correas y otros mecanismos de ajuste.
4. **Almacenamiento:** Guarde el soporte en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad o el polvo. Evite que se pliegue, se arrugue o se someta a presión excesiva, lo que podría afectar su forma y funcionalidad. Mantenga el soporte Eagle Support en un espacio donde no se exponga a objetos que puedan dañarlo.
5. **Inspección Regular:** Revise periódicamente el soporte Eagle Support para detectar signos de desgaste o daño, especialmente en componentes como bisagras, correas, hebillas y mecanismos de bloqueo. Reemplace cualquier parte dañada o desgastada para asegurar que el soporte mantenga su rendimiento óptimo.

Siguiendo estos cuidados, podrá prolongar la durabilidad, el confort y la efectividad de su soporte ortopédico Eagle Support, asegurando su uso prolongado y eficiente.